

# MCG Eversense: PRÓXIMOS PASOS



## Cuidados de la incisión para una adecuada cicatrización



- **No nade ni se sumerja en una bañera durante cinco días.**
- Evite las actividades extenuantes que puedan tirar de la incisión o provocar mucha sudoración alrededor de la zona de inserción mientras se cura.
- Sustituya Tegaderm™ si se despegas; de lo contrario, déjelo puesto sobre las Steri-Strips™.
- Deje los Steri-Strips™ puestos hasta que se desprendan.
- Recorte los bordes de los Steri-Strips™ si empiezan a despegarse; no los retire al hacerlo.

## Informe al profesional sanitario correspondiente si:

- Sus Steri-Strips™ se desprenden antes de que la incisión esté completamente cerrada.
- Tiene fiebre, dolor, enrojecimiento, inflamación, sensación de calor o secreciones en el lugar de la incisión.

**Nota:** Si necesita sustituir Tegaderm™, tenga especial cuidado para que no se desprendan los Steri-Strips™.

Revise detenidamente la sección **Beneficios y riesgos** de la **Guía del usuario de Eversense 365**.

## DÍA 1: PUESTA EN MARCHA

- Lea la **Guía del usuario** y **Guía de consulta rápida**.
- Descargue la aplicación **Eversense 365** y vincule el transmisor a su dispositivo móvil.
- Vincule su sensor y el transmisor inteligente y comience la fase de calentamiento de 24 horas.
- Introduzca los ajustes proporcionados por su profesional sanitario.
- Apague el transmisor, no es necesario llevarlo puesto hasta que comience la fase de inicialización.

## DÍA 2: EMPIEZA LA FASE DE INICIALIZACIÓN

- Coloque su transmisor inteligente con adhesivo sobre el sensor y complete 4 calibraciones de Inicialización, con un intervalo de 2 a 12 horas.
- Después de la 2ª calibración correcta, empezará a ver sus datos de glucosa.

## DÍA 3 Y POSTERIORES: USO DIARIO

- Comienza la fase de calibración diaria. Realice calibraciones una vez al día durante 13 días.
- En el día 14 se realizará la calibración una vez por semana.
- Para compartir los datos del MCG con su profesional sanitario, siga los pasos que se indican en la **Guía del usuario**

## A QUIÉN DEBE DIRIGIRSE SI TIENE PREGUNTAS

- Si tiene dudas sobre el lugar de inserción, póngase en contacto con el profesional sanitario que le realizó la inserción.
- Si tiene preguntas sobre el control de la diabetes, póngase en contacto con el profesional sanitario que le realizó el procedimiento.
- Si tiene preguntas técnicas o necesita ayuda para empezar a utilizar Eversense, póngase en contacto con **900 100 117 (extensión 2)**.

Los vídeos de introducción a MCG de Eversense están disponibles en:

<https://global.eversensediabete.com/patient-education/eversense-user-guides/>

